

Notice d'utilisation du Nosten2®

1/ Décontaminer le Nosten2®

2/ Gonfler le Soufflet®

3/ Régler la pression

1) Décontaminer le Nosten2®

- > Positionner la masse coulissante sur le chiffre le plus petit.
- > Relever et basculer le plateau mobile.
- > Imbiber une lingette jetable avec le décontaminant utilisé couramment dans le service (ex : Anios, Surfanios...).
- > Frotter toutes les surfaces du **Nosten2®** pour une décontamination parfaite.

2) Gonfler le Soufflet®

- > Sortir le **Soufflet®** de son emballage et le placer entre les 3 plots du **Nosten2®**.
- > Se munir d'une seringue de 60cc avec embout « Luer lock ».
- > Visser la seringue sur le robinet 3 voies du **Soufflet®**.
- > Gonfler le **Soufflet®** en tournant le robinet pour chercher l'air sans dévisser la seringue.
- > Répéter l'action 5 fois pour injecter 300cc d'air. Le haut du **Soufflet®** doit être sphérique mais souple sous la pression du doigt.
- > Repositionner le plateau mobile du **Nosten2®** sur le **Soufflet®**.

La base de la tranche avant du plateau mobile doit être à la hauteur des encoches (ou du trait) du **Nosten2®**. Si elle n'est pas alignée, retirer de l'air du **Soufflet®** avec la seringue toujours branchée sur le robinet 3 voies.



3) Régler la pression

- > Régler la pression du **Soufflet®** en positionnant la masse coulissante du **Nosten2®** sur une des valeurs indiquées sur le dessus du plateau. *Ces valeurs correspondent à 1 cm d'eau près aux valeurs données par le manomètre.*
 - **Pour un patient adulte** : placer la masse coulissante sur la valeur 24 (*partie avant au niveau de l'encoche de la masse coulissante*).
 - **En pédiatrie** : laisser la masse coulissante du **Nosten2®** en position sur la pression minimum (*partie avant au niveau de l'encoche de la masse coulissante*).
- > Brancher le « Luer lock » situé à l'extrémité de la tubulure du **Soufflet®** sur la valve anti-retour de la ligne d'air du ballonnet du patient.
- > Ajuster la pression en fonction des besoins du patient en déplaçant la masse coulissante du **Nosten2®**.

Les équipes soignantes doivent s'assurer, une fois par tour, que la tranche du plateau mobile est correctement placée et, le cas échéant, signaler l'ajout d'air dans Le Soufflet® à la contre-équipe.

4) Durée d'utilisation : Après 30 jours d'utilisation, jeter le « Soufflet » et placer un nouveau « Soufflet » dans l'emplacement prévu dans le Nosten2 pour un nouvel usage.

Entretien du Nosten2®

Pour faciliter le déplacement de la masse coulissante, si besoin : lever le plateau mobile, le maintenir à la verticale et placer de l'huile silicone en haut du rainurage tracé dans l'épaisseur du plateau.